


高齢者、軽度障害者の自立補助用品

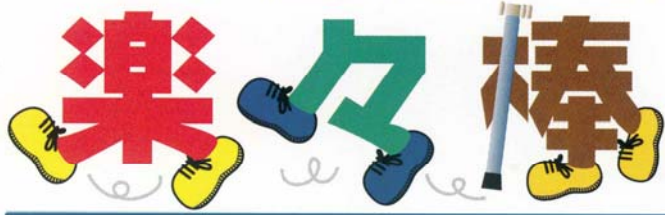

らくらくぼう



御爺ちゃん、御婆ちゃん、とのドライブに一つ如何ですか？

使い方は簡単、ドア・ストッパーに(1)差し込んで、倒すだけで手摺りになり、(2)(3)楽に立ち上がれます。



①

抗菌加工

体が御不自由な方が車での外出をされる時に、御手伝いする為に作りました。



②



③

特長

- 1 車から降りる時に楽
- 2 車に乗る時に楽。
- 3 握り部分は木製で抗菌、滑り止め塗装。
- 4 金具部分は軽くて丈夫。



取り扱いの注意

- 使用後は、外さないとドアが閉まりませんので必ず外して下さい。
- 国産車の殆どの車に御使い頂けますが、一部車種及びスライド・ドアの車では使えない場合がありますので御注意下さい。
- 御使用前に、この取り扱い説明を、よく読んで確認した上で正しく使用して下さい。

- ⚠ 重度障害の方は介護者の方と使用して下さい。
- ⚠ お子様の手の届く所には置かないで下さい。
- ⚠ ストッパーのネジの緩みが無いか確認して下さい。
- ⚠ 車のボディに傷を付けない様に注意して下さい。



楽杖に付けられます

生産物賠償責任保険付・特許出願中

是非一度楽々棒を御試し下さい。詳しくはホームページで御案内をして居ります。

紙：パンフレット PET：箱



和田工業株式会社

<http://wada-kk.info>

岐阜県各務原市金属団地50番地
TEL0583-82-1291 FAX0583-82-1292
E-mail:info@wada-kk.jp

代理店